

Denu Root Seal Használati útmutató

(Epoxygyanta alapú végleges gyökércsatorna-tömő anyag)

Javallatok: Gyökércsatornák végleges lezárása

Összetétel:

Alapanyag: Epoxi-oligomer gyanta, etilénglikol-szalicilát, cirkónium-oxid

Katalizátor: Poliamin, cirkónium-oxid, kalciumcement (MTA)

Keverés:

Keverje össze a szükséges mennyiségű alapot és a katalizátort egy keverőlapon 15-20 másodpercig, vagy amíg krémes, homogén állagot nem kap egy spatulával.

Használati utasítás:

A csatorna falainak száraznak kell lenniük. A DenuRoot Seal-t lentulóval vagy guttaperchával, ezüst vagy titán gyökércsatorna-tüskékkel kell a csatornára vinni.

Az anyagban keletkező légbuborékok és a csatorna túltöltésének elkerülése érdekében lassan, alacsony sebességgel mozgassa a lentuló a csúcs felé.

Merítse a fertőtlenített és száraz mesterguttapercha csúcsot a DenuRoot Sealbe, és pumpáló mozdulatokkal lassan nyomja a csatornába.

Figyelmeztetés:

Ne alkalmazza allergiás betegeknél!

Gyermekektől elzárva tartandó!

Csak fogászati használatra!

Ne használja a lejárt szavatosságú terméket!

Tárolás:

Kerülje a hőt és a közvetlen fényt!

Használat után tartsa zárva a fecskendő kupakját!

Szobahőmérsékleten tárolandó.

Eltarthatóság:

A gyártástól számított 2 év (szobahőmérsékleten)

Tartalom:

1 x 12 g (alap: 6 g, katalizátor: 6 g) kettős fecskendő, keverőpárna, spatula