

DENU TEMP CROWN CARTRIDGE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Önkötő ideiglenes korona-, hídanyag

A DenuTemp Crown patron egy olyan anyag, amely ideiglenes pótlások készítésére szolgál a rendelőben. A kétkomponensű, multifunkcionális metakrilát alapú anyag automatikusan keveredik. A DenuTemp Crown patron alacsony viszkozitású kompozitok segítségével módosítható és személyre szabható.

Felhasználási javallatok:

☑ Ideiglenes koronák, hidak, inlay-k, héjak és tartós ideiglenes restaurációk készítésére szolgál

Ellenjavallatok:

Nem alkalmazható, ha a páciensről ismert, hogy allergiás a metakrilát gyantára.

Használati utasítás:

1. Fog előkészítése vagy eltávolítása előtt vegyen lenyomatot alginát, szilikon vagy hőre lágyuló lenyomatanyaggal.
2. Szárítsa meg az előkészített fogakat, és kenje be a lerakódásokat, a környező szöveteket, és a kompozitot vékonyan vazelinnel vagy hasonló elválasztó anyaggal.
3. Helyezze a patront a lenyomatpisztolyba.
4. Adagolja a Denu Temp Crown Cartridgét a lenyomatba.

Először vigye fel az anyagot az okklúzális felszínekre, majd ínyhez igazítsa,

kissé ráépítve a buborékok képződésének elkerülése érdekében. Fontos, hogy a kanül hegye az anyagban maradjon.

5. Helyezze a Den Temp Crown Cartridgével töltött lenyomatot az előkészített fogakra **20 másodperccel** a keverés kezdetétől számítva, enyhe nyomással, és tartsa erősen a helyén.

6. A rugalmas fázis alatt, ezúttal a keverés után **60-80 másodperccel** vegye ki az ideiglenes pótlást a szájból.
7. Ellenőrizze a kötési folyamatot a szájból lévő felesleges anyag segítségével.
8. Az oxigéngátló réteget alkohollal (pl. etanollal) teljesen távolítsa el, miután az anyag teljesen megkötött (legkorábban **5 perccel** a keverés megkezdése után). Polírozza, ha szükséges. Ellenőrizze az okklúziót, és szükség esetén állítsa be megfelelő eszközökkel.
9. Polírozza manuálisan gumi polírozóval vagy kecskeszőrkefével, vagy lakkozza a felületet fényre kötő, magassfényű lakkal.
10. Cementezze az ideiglenes pótlást bármilyen ideiglenes cementtel.
11. Ellenőrizze az okklúziót.

A DenuTemp Crown patron egy olyan anyag, amely ideiglenes pótlások készítésére szolgál a rendelőben. A kétkomponensű, multifunkcionális metakrilát alapú anyag automatikusan keveredik. A DenuTemp Crown patron alacsony viszkozitású kompozitokkal módosítható és személyre szabható.