

Alginát

Használati Útmutató

Termékünket műanyag zacskóban hozzuk forgalomba.

Antagonista lenyomat célokra javasolják a gyártók.

Nettó töltő súly: 500 g

Színe: színváltós (halvány rózsaszínből fehér lesz)

Íze: mentolos,

Lejárat: gyártástól 3 év (gyárt. Idő: a zacskó tetején)

Normál keverési arány: 10 g porhoz 23 ml víz, (a porhoz küldünk mérőkanalat)

Kötés sebessége: normál kötési idejű,

Összetevők: alginát, ZnO, Talcum, kovaföld

Keverési idő 23°C-on: 45 mp, / nedves közegben 100 óra a térfogatállósága/

Kötési idő 23°C-on: 2 perc 15 mp (a keverés megkezdésétől a teljes megkeményedésig)

Feldolgozási idő 23°C-on: 1 perc 30 mp

(ennyi idő alatt kell a keverés megkezdésétől a szájba jutnia,
vagyis 45 mp alatt megköt a szájban),

A termék nem toxikus!

CE megfeleléséggel rendelkezik.